



# DentiqGuide

How to Install DentiqGuide



## 3D INDUSTRIAL IMAGING

Address : 138-412 Institute of Computer Technology, Seoul National University, Seoul, South Korea

Website : [www.3dii.net](http://www.3dii.net)





쓰리디산업영상  
3D INDUSTRIAL IMAGING



# How to Install DenitqGuide v1.3.04

## 1. 덴틱가이드 v1.3.04 업데이트 하기

- DenitqGuide 소프트웨어 업데이트 방법은 2가지가 있습니다.
    - (1) [㈜쓰리디산업영상 홈페이지](#)를 통하여 통하여 풀버전을 다운로드 받은 후, 압축 해제 -> 제품 설치 (신규 유저) [1번 이미지 참조]
    - (2) 소프트웨어 내의 업데이트 기능을 이용한 업데이트 (기존 유저) [2번 이미지 참조]
- \*보다 자세한 업데이트 내용은 제품 FAQ\_내의 제품 설치하기를 참조 부탁드립니다.

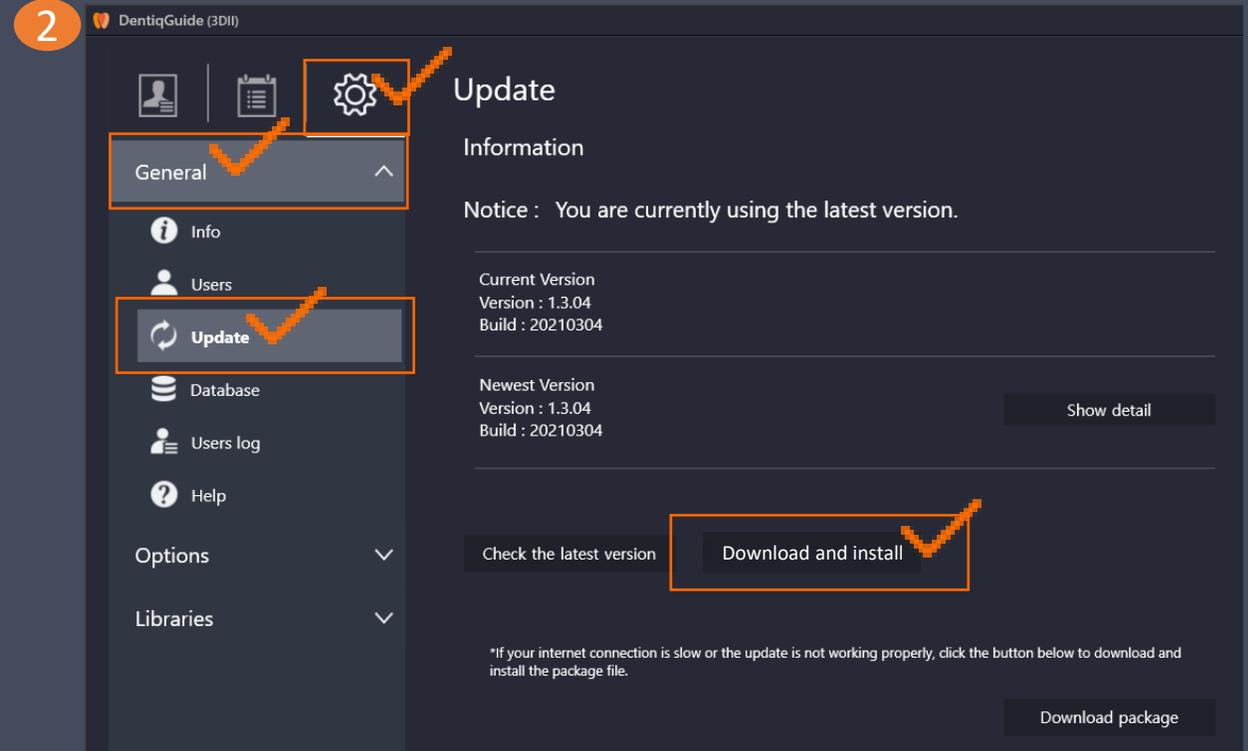
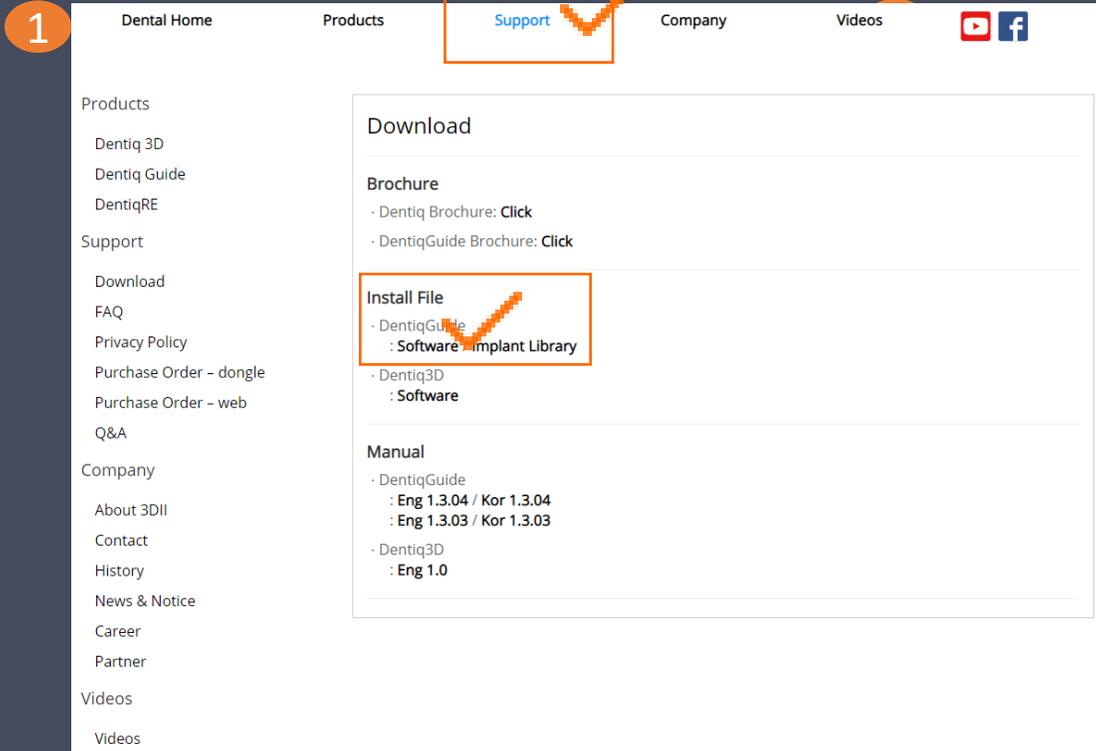




# How to Install DenitqGuide v1.3.04

## 2. 윈도우 상에서의 PC보호창(스마트스크린)이 생성 되었을 때 해결 방법

- 스마트 스크린 필터(제품 설치시의 Widnows의 PC 보호 팝업 스크린)란?
  - Windows에 보고된 피싱사이트를 탐지할 수 있는 인터넷 익스플로러의 기능이며, 멀웨어의 다운로드 또는 프로그램 설치를 미연에 방지할 수 있도록 하는 Windows의 보안장치
- 해결 방법 (스마트 스크린 필터는 최초 1회만 생성이 됩니다. 향후에는 생성이 되지 않습니다.)
  - 하기의 1, 2, 3 이미지 참조

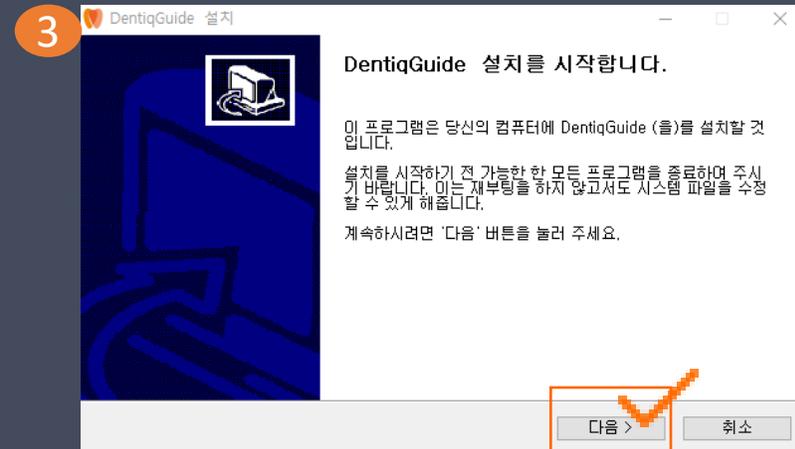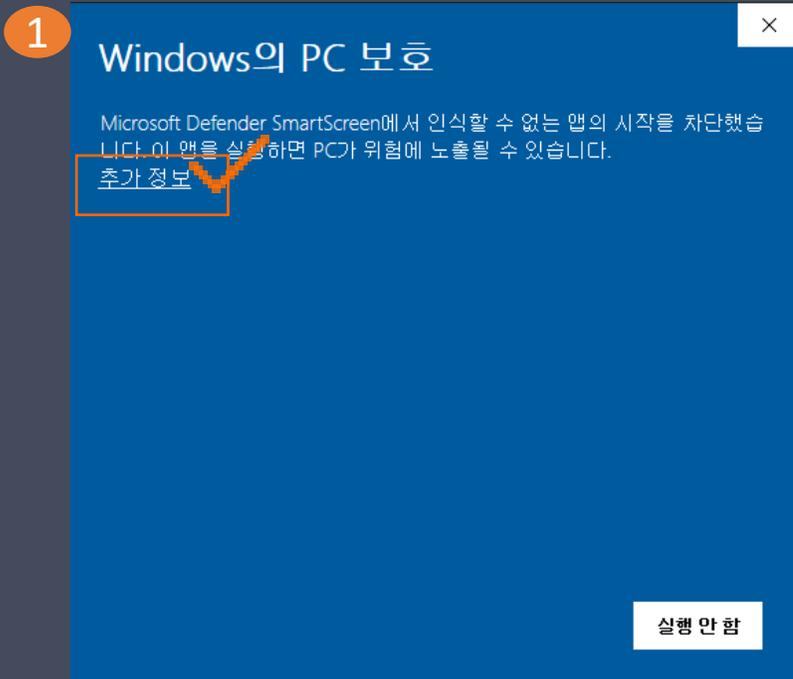




# How to Install DentiqGuide v1.3.04

## 3. 설치 완료 및 정상 실행

- 다음 부분은 이전과 동일한 설치 과정을 거치시면 됩니다.

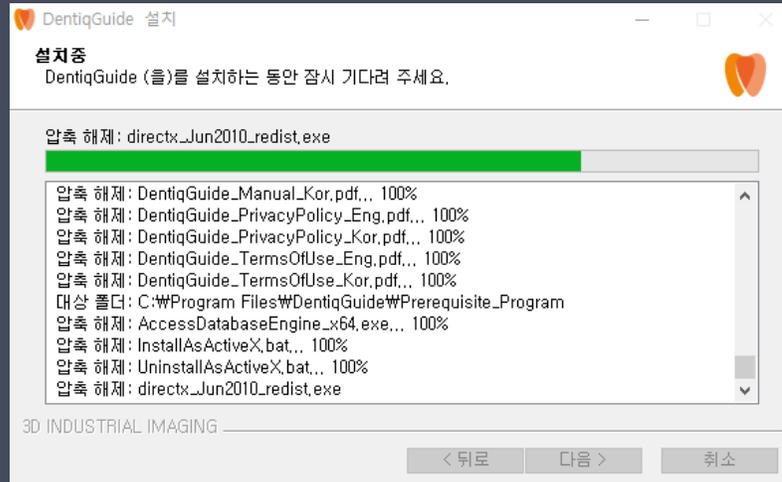



# Thank you

The Best Choice for your Digital Dentistry

**3D INDUSTRIAL IMAGING**

Address : 138-412 Institute of Computer Technology, Seoul National University, Seoul, South Korea

Website : [www.3dii.net](http://www.3dii.net)



쓰리디산업영상  
3D INDUSTRIAL IMAGING